中山醫學大學附設醫院

主題名稱	男性導尿訓練模型					
工人工作	Male urinary catheterization training model					
編號	222020-001-W-010	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日	
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日	
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日	

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員,瞭解男性導尿訓練模型之操作及模具保養規範。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

男性導尿模型 (KOKEN,型號:LM-029)

(一)操作步驟及要點說明

步驟	說明		
1.使用方法: (1) 插入導尿管之前,請先用潤滑劑做好潤滑處理以後再操作。 (2) 依據標準程序執行導尿技術。 (3) 因固定導尿管需用到膠帶時,請將膠帶黏貼部位的污滯用洗劑或酒精清除。			
2.清潔方法: (1) 潤滑劑的清潔方法: A. 直接將水龍頭對準尿道口沖洗。 B. 利用塑膠容器裝水沖洗。 C. 將尿道軟管與膀胱分離洗淨,另外膀胱可取下清洗。 (2) 表皮及樹脂台用溫水加入中性清潔劑擦拭乾淨。	使用完畢要確認模型已保持全乾的狀態在收入保管箱。		

(二)注意事項

1.本模型以特殊矽膠製成,觸感柔軟,所以如果導尿管無法順利插入,不要勉強使

版權為中山醫學大學附設醫院所有,禁止任意抄襲、翻印及轉讓

主題名稱	男性導尿訓練模型	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-010	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/3

用,以免損壞。

- 2.使用前先用潤滑劑,不要勉強插入。
- 3. 表皮內部是海綿,因此不要浸泡在水中。
- 4.請注意不要掉落或碰撞模型,會使樹脂台破裂。
- 5.不要存放在陽光直接照射或潮濕的環境中,以避免變形。

(三)實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	男性導尿訓練模型	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-010	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/3

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101 年 05 月 21 日 醫學教育部內部會 議通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	