中山醫學大學附設醫院

主題名稱	前列腺檢查訓練模型 Prostate examination training model				
編號	222020-001-W-018	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員,瞭解前列腺檢查訓練模型之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

前列腺檢查訓練模型 (Adam Rouily,型號:N-E01):

(一)操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.使用前:	
(1) 請務必以原廠隨附之潤滑劑或中性清	
潔劑溶液於前列腺模型的前端(接觸下	4
半身模型體內)做潤滑,如此可增加觸	
診時的真實觸感。	
(2) 將前列腺模型慢慢推入下半身模型的	
骨盆腔內,可自行調整前列腺的位置。	切記不要使用含凡士林之潤滑劑,因為可
(3) 將鐵棒固定。	能會造成模型的損壞。
2.使用時:	
(1) 戴上檢驗用手套,並潤滑手套和模擬肛 門處。	直接用手觸摸可能會造成直腸壁的破裂。

主題名稱	前列腺檢查訓練模型	制定單位		臨床技能訓練中心		
編號	222020-001-W-018	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/3	

步驟	說明
3.清潔維護:	
(1) 只要會接觸到模型或前列腺模型,皆須	
使用潤滑劑,以減少破裂情形並延長模	
型的使用壽命。	
(2) 請使用中性清潔劑溶液或清水擦拭模	
型外表。請勿使用具腐蝕性或含化學物	
質之清潔劑。	
(3) 請勿將模型放在含油印之紙類和物品	
上或用原子筆做記號,避免造成永久性	
的沾污。	

(二)實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	前列腺檢查訓練模型	制定單位		臨床技能訓練中心		
編號	222020-001-W-018	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/3	

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101年05月21日 醫學教育部內部會 議通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	