中山醫學大學附設醫院

主題名稱	心音與呼吸音綜合練習模型 Heart sounds and breath sounds comprehensive traning model					
編號	222020-001-W-026	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日	
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日	
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日	

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員,瞭解心音與呼吸音綜合練習模型之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

心音與呼吸音綜合練習模型 (SAKAMOTO,型號:M-164):

(一)操作步驟及要點說明

步驟	說明
1.將電腦、機械盒接上模型本體。	
2.啟動電腦、機械盒。	
3.將機械盒轉至最大頻率。	機械盒轉至最小頻率,持聽診器聽模型本
	贈。
4.操作儀表板出現時,設定案例呼吸、心跳、 次數、音量等進行練習。	選擇電腦面上之聽診體。
5.操作按下▶鍵開始,操作按下■停止。	
6.使用後將將電腦、機械盒接上模型本體歸	
位。	

主題名稱	心音與呼吸音綜合練習模型	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-026	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/3

(二)實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	心音與呼吸音綜合練習模型	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-026	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/3

八、文件修正紀錄

版本	修正說明	備註
1.0	新制定	101年05月21日 醫學教育部內部 會議通過
2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
	1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	1.0 新制定 2.0 配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。 2.0 年度檢閱,無修正。版本不變動。