中山醫學大學附設醫院

主題名稱	十二導程心電圖儀 Complete EKG				
編號	222020-001-W-029	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員,瞭解十二導程心電圖儀之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

(一) 準備用物

十二導程心電圖儀(廠牌規格:億鑫 FCP-2155)。

步驟	說明
1.接上ECG導線	
(1)EKG Lead連接位置:	Laton V
RA—右手腕部、LA—左手腕部	5
RL—右腳踝部、LL—左腳踝部	
V1—第四肋間胸骨右緣	4
V2—第四肋間胸骨左緣	V1 V2
V3介於V2 和V4 中間位置	V3 V6
V4—第五肋間與鎖骨中線交叉處	
V5—腋前線與V4 等高處	
V6腋中線與V4 等高處	
2.打開之電源開闢(在儀器側面按下電源開	充電電池(在板側邊),按下ON鍵
關到"O"位置)	
3.操作板面:	
(1)MODE模式鍵:選擇自動解析、自動導	
程、手動、不整脈、R-R時序檢測模式	
(2)PROGRAM功能鍵:進入功能模式	
(3)SENSITIVITY感度鍵:調整心電圖振幅	AUTOCAMENTER LIG PEP-2155
大小,有AUTO 2.5、5、10、20mm/mV	
(4)SEX性別鍵:選擇男性或女性	

版權為中山醫學大學附設醫院所有,禁止任意抄襲、翻印及轉讓

主題名稱	十二導程心電圖儀	制定單位		臨床技能訓練中心		
編號	222020-001-W-029	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/3	

步驟	說明
(5)AGE年齡鍵:選擇年齡群	
(6)LEAD:導程選擇鍵	
(7)COPY複製鍵:複製自動解析	
(8)RESET重置鍵:按此鍵波形會重置,放	
開此鍵波形會開始記錄	
(9)1mV鍵:手動記錄模式時提供一個刻度	
的波形	
(10)START/STOP開始/停止鍵:按下此鍵開	
始列印報告,再按一次停止列印	
4.使用完畢後需繼續蓄電。	

(二) 實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	十二導程心電圖儀	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-029	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/3

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101年05月21日 醫教部內部會議 通過
102.02.06	2.0	配合标准化文件管理辨法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	