中山醫學大學附設醫院

主題名稱			點滴幫浦 IV Pump		
編號	222020-001-W-031	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日

一、目的

使醫護人員及醫事相關人員,瞭解點滴幫浦之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

點滴幫浦(廠牌規格:TOP2200):

(一)步驟及要點說明

步驟	說明
 1.功能介紹及使用步驟: (1) 依醫囑調整設定滴數。 (2) IV SET:依所使用輸液器調整鈕適用各種輸液器(15滴、19滴、20滴、60滴/ml)。 (3) 再調整每分鐘滴數,或每小時進入量。 	再調整每分鐘 滴數,或每小時 進入量。 請依所使用輸液器調整此鈕適用各種輸液器
(4) 感應器需夾在液面上滴頭下之間,若液面太高須將液體排掉。	

版權為中山醫學大學附設醫院所有,禁止任意抄襲、翻印及轉讓

主題名稱	點滴幫浦	制定單位		臨床技能訓練中心		
編號	222020-001-W-031	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/4	

	輸液管路需將空氣完全排除。
(5) 輸液管路需固定好後再關起門。(6) 壓板需夾住管路。	
(7) 開電源。	可用選擇鍵調整至所要的模式
 (8) IV SET設定滴數。 (9) 選擇鍵調整至所要的模式(RATE 一般使用狀態、VOL.LIMIT設定欲 達進入總量、TOTAL VOL.可看總 進入量)。 (10) 調整滴數(依醫囑設定所需滴數)。 (11) 按開始鍵。 	 電源 設定滴數鍵 開始鍵 停止鍵及關閉警 調整滴數鍵 加sh 鍵
(12) 感應器:不用時需夾至此位置以防 損壞。	
2.注意事項:	
(1) 警告音響按警告因關閉鍵(停止鍵)	
將會停止輸液,此時需尋找問題導	
因並去除後按開始鍵。	
(2) 所有動作前需按停止鍵才能操作下	
一個動作操作完後記得按開始鍵。	
(3) 若連續使用超過24小時,必須將壓	
板上的輸液官移動,以免變形影響	
(+) 政尺低连総里(VOI minu)石 U l 注元 成,雪 重 准 λ vol limit 描 式 收识 定 导	
放 而行 些 八 VOI mm (兵 八 所 改 定 里 按 至 無 數 字 , 降 非 雲 更 續 用 袹 達 緧	
量此功能。	

(二) 實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

主題名稱	點滴幫浦	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-031	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/4

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	點滴幫浦	制定單位		臨床技能訓練中心		
編號	222020-001-W-031	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	4/4	

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101年05月21日 醫教部內部會議 通過
102.02.06	2.0	配合标准化文件管理辨法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	