中山醫學大學附設醫院

主題名稱					
			One Touch		
編號	222020-001-W-033	制定者	林秀琴	公布日期	101年05月21日
制定單位	臨床技能訓練中心	核准者	田雨生	修正日期	102年02月06日
版本/總頁數	第 2.0 版/3 頁	審查者	曾翊緁	檢閱日期	112年07月03日

一、目的

讓醫護人員及醫事相關人員,瞭解血糖機之操作步驟及要點說明。

二、範圍

臨床技能訓練中心學員。

三、說明

血糖機(廠牌規格:NPB-295)。

(一)步驟及要點說明

步驟	說明
1.按下面板左上角之電源開關(藍色按鈕)。	LUPESCAN ID 7 Monte ID:DD m SureStep Plus
2. 螢幕顯示-顯示區會先出現最後之血糖值或品	
管液測試值(包含時間及日期)3秒鐘。	
3.核對試紙號碼(出現CODE)-若不相同,則按 綠色鈕(C鈕)直到與試紙代碼相同為止。	Netering and a second sec
4. 採血-使用採血筆採血。	

主題名稱	血糖機	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-033	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	2/4

5.將血滴在粉紅測試區-檢視確認試紙背面之目 測圓點須呈均勻藍色方能獲得準確之測試結 果。	LIFESCARI ELIFESCARI SLITESEEP
6. 試紙粉紅色面朝上,儀器出現插入儀器內。	
 試紙插入儀器後出現(時鐘計秒符號)約15-30 秒內出現測試值。 	測試值大於500 mg/dl顯示Hi。
 8. 按綠色鈕 (C鈕) 並按一次電源開闢 (藍色按鈕) 後放開-進入設定模式 (1) 設定時間:按C 鈕可設定「時」及「分」, 按藍色按鈕可跳至下個選項。 (2) 設定時間:按C 鈕可設定「年份」,SOP 按藍色按鈕可跳至下個選項。 (3) 設定時間:按C 鈕可設定「月」及「日」, 按藍色按鈕可跳至下個選項。 (4) 設定可選擇開機時是否顯示上次測試結果 (M-On / OFF)。 (5) 按C鈕可設定測量單位(mg/dl / mmol/L)。 (6) 按C鈕可設定是否有聲音。 (7) 按C鈕可選擇是否需要14 天的血糖平均值 (14.dy- On / OFF)。 (8) 按 C 鈕設定時間模式(AM / PM / 24 : 00)。 	*按C鈕可設定,藍色按鈕可跳至下個 選項。
 9.按綠色鈕(C鈕)並按一次電源開闢(藍色按鈕)後直到螢幕畫面閃一下後放開-可查詢之前 測試結果。 	按C鈕可選擇。

(二) 實施及修訂

本辦法經醫學教育部內部會議通過後公布實施,修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

主題名稱	血糖機	制定單位		臨床技能訓練中心	
編號	222020-001-W-033	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	3/4

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	血糖機	制定單位		臨床技能訓練中心		
編號	222020-001-W-033	版本	第 2.0 版	頁碼/總頁數	4/4	

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.05.21	1.0	新制定	101年05月21日 醫教部內部會議 通過
102.02.06	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行 年度臨時檢閱	
103.09.15	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
104.08.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
105.12.30	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
106.12.29	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
107.05.01	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
109.12.17	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	
112.07.03	2.0	年度檢閱,無修正。版本不變動。	